


PUSH PUCKS

Světelné reakční pody

Rychlý návod k použití

Česká verze pro sadu 4 ks

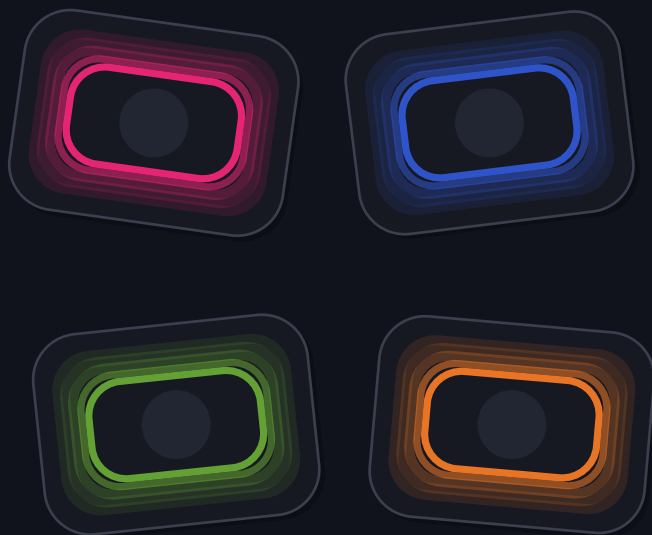

Sada 4 ks • Bluetooth • Ovládání přes aplikaci • Světlo a zvuk

Vítejte ve světě PUSH Pucks!

Děkujeme, že jste si vybrali PUSH Pucks!

Naší vizí je, aby si lidé cvičení zamilovali ještě více. Budeme rádi, když o PUSH Pucks řeknete i svým známým.

Připojení



Pody se připojují k aplikaci PUSH přes Bluetooth. Další pody můžete do aplikace později snadno přidat.

Funkce senzoru



Každý pod má na horní straně senzor. Aktivujete jej dotykem nebo přejetím ruky přes senzor.

Hry a nastavení



V aplikaci najdete několik tréninkových her. Nastavení lze snadno upravit a trénink přizpůsobit vašim potřebám.

STÁHNĚTE SI APLIKACI A PUSŤTE SI ÚVODNÍ VIDEO

Naskenujte QR kód telefonem. Na úvodní stránce si můžete stáhnout aplikaci a přehrát video se základním postupem používání.



Zapnutí, vypnutí a připojení



Zapnutí podů

Každý pod má na zadní straně tlačítko. Jedním stisknutím zapnete pody, které chcete použít. Při spuštění pod bliká.

Vypnutí podů

Ruční vypnutí

Podržte tlačítko na zadní straně každého podu, dokud pod nezačne blikat.

Automatické vypnutí

Po určité době nečinnosti se pody automaticky vypnou. Výchozí doba je 10 minut.

PŘIPOJENÍ PODŮ K APLIKACI

Po stažení aplikace a zapnutí podů je můžete připojit dvěma způsoby:

1

Klepněte na „Devices“ (Zařízení) a poté stiskněte každý pod.

2

Klepněte na symbol podu se znaménkem plus vpravo nahoře. Poté stiskněte každý pod. Tato možnost může být později nahrazena.

TIP

Pokud se pody v seznamu nezobrazují, zkontrolujte, zda jsou zapnuté.

Technické údaje

1 POD

Elektrické a fyzické parametry

Nabíjecí napětí
5 V DC

Nabíjecí port
USB-C

Provozní napětí
3,7 V DC

Kapacita baterie
1 000 mAh, Li-Pol

Provozní proud
< 110 mA

Rozměry
130 × 130 × 30 mm

Proud v pohotovostním režimu
< 45 mA

Hmotnost
175 g

Připojení
Bluetooth 5.0 / 2,4 GHz

Automatické vypnutí
po 10 minutách

Doplňující provozní informace

- Přibližná výdrž baterie: 8–10 hodin.
- Aplikace PUSH je určena pro zařízení iOS a Android.
- Pody jsou odolné proti potu a lehkému postříkání; nejsou určeny pro použití v dešti ani k ponoření do vody.

Česká verze dokumentu

Český překlad rychlého návodu dodaného s výrobkem.
Při rozporu má přednost aktuální dokumentace výrobce
a informace v aplikaci PUSH.
Produkt a podpora: RehaVita.cz

